

FEP PLURIUSO

FISSATORE POLIVALENTE

Modulare

Versatile

Leggero



Indicazioni

Fratture chiuse, esposte e patologiche degli arti, fratture del bacino e fratture articolari (anca, ginocchio e caviglia).

Pseudoartrosi, correzioni di deformità degli arti (correzioni assiali e ipometrie).

CARATTERISTICHE


Realizzato in lega di Alluminio

Disponibile in tre misure (piccolo, medio e grande)

VANTAGGI


Leggero

Ampia gamma di applicazione

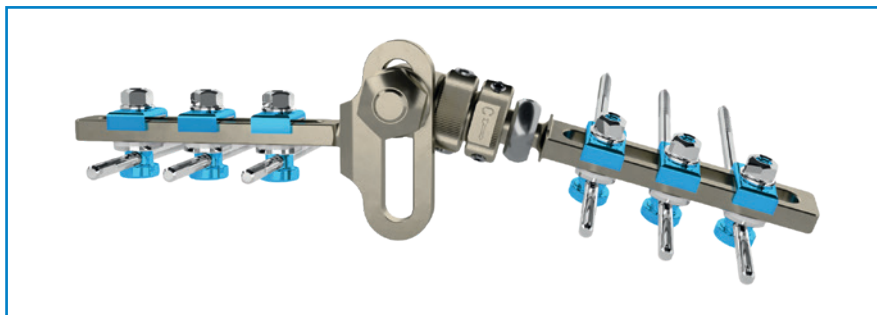


Il FEP consente una correzione sui tre piani grazie alle proprie caratteristiche e alla modularità dei suoi accessori. Lo snodo centrale permette la correzione del procurvato-recurvato. Il complesso di compressione-distrazione corregge i difetti di rotazione e i movimenti assiali lungo la diafisi. I maniglioni e i regolatori micrometrici, agendo sugli elementi di presa, consentono la correzione del varo-valgo. Ogni correzione può essere effettuata in maniera indipendente su ogni piano senza perdere la correzione precedente.


Modularità dei morsetti

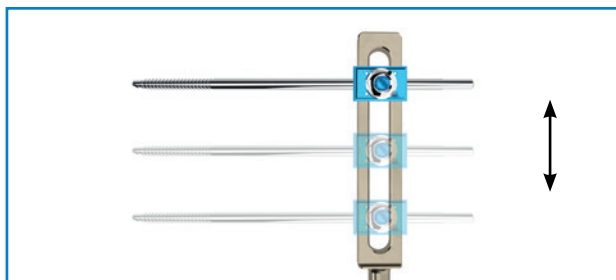

Scorrimento longitudinale sulle barre a binario

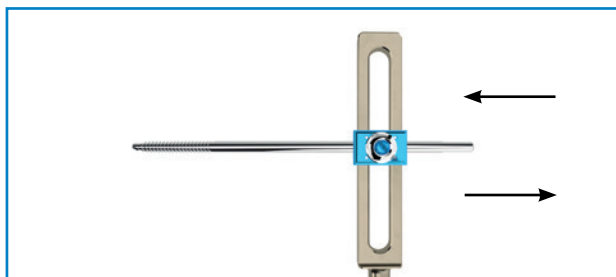


Scorrimento latero-laterale degli elementi di presa sulla barra a binario

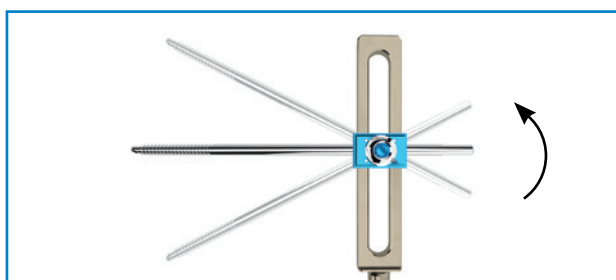


Rotazione del morsetto sulla barra a binario, con la possibilità di inclinazione degli elementi di presa


Modelli fissatore

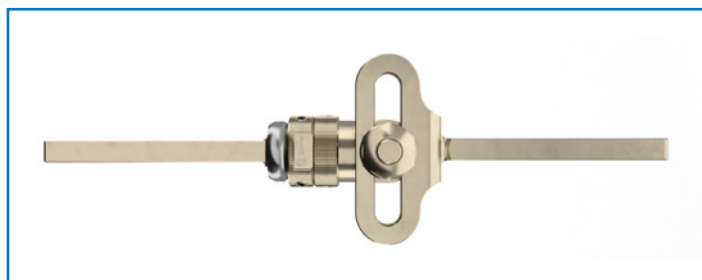

Fissatore grande

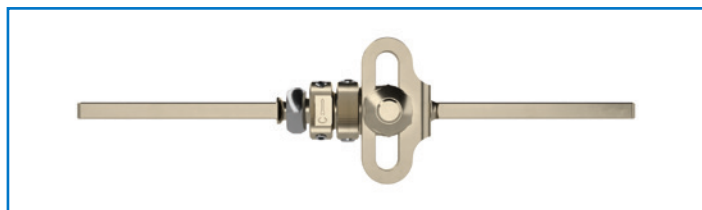

Fissatore medio

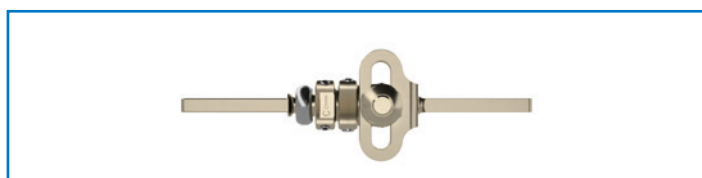

Fissatore piccolo

Codice	Descrizione
5000060	Elemento base dinamizzabile piccolo
5000067	Elemento base dinamizzabile medio
5000068	Elemento base dinamizzabile grande

Il corpo del fissatore è privo dei morsetti ed è fornito in confezione NON sterile.

Fissatore angolare




Questo fissatore trova applicazioni nelle fratture metaepifisarie e nelle correzioni angolari degli arti inferiori. Il fissatore presenta una coppia di morsetti in configurazione a "T" e, all'altra estremità una barra a binario collegata al corpo da una cerniera.

Codice	Descrizione
5000061	Elemento angolare grande
5000062	Elemento angolare medio


Il corpo del fissatore è privo dei morsetti diafisari ed è fornito in confezione NON sterile.

Morsetti


Monouso, disponibili in confezione singola e sterile.

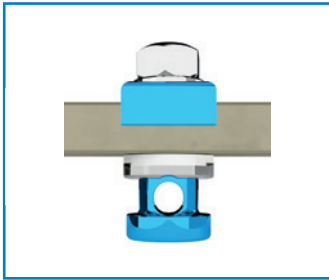


Morsetto singolo

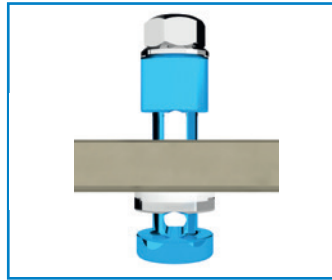

Morsetto prolungato o a "T".
Consente l'utilizzo di una
coppia di viti parallele.

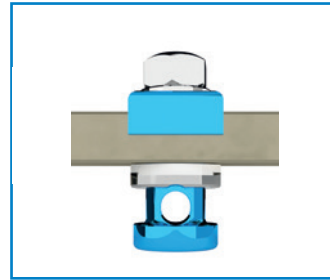

I morsetti modello grande possono ospitare viti e/o fili
con diametro compreso tra 1.5 mm e 6.0 mm.
I morsetti modello piccolo e medio possono ospitare viti
e/o fili con diametro compreso tra 1.5 mm e 5.0 mm.

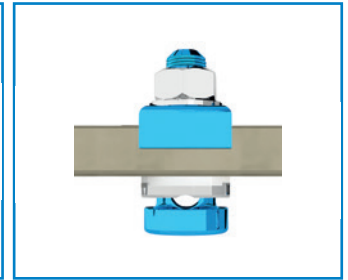



Codice Descrizione

5000002ST	Morsetto singolo per FEP piccolo e medio
5000003ST	Morsetto prolungato per FEP piccolo e medio
5000031ST	Morsetto singolo per FEP grande
5000032ST	Morsetto prolungato per FEP grande

Raccordi ad arco

Disponibili in due configurazioni: 90° e 180°

Consentono di posizionare viti e/o fili su piani diversi rispetto al corpo del fissatore, garantendo una migliore stabilità all'impianto.

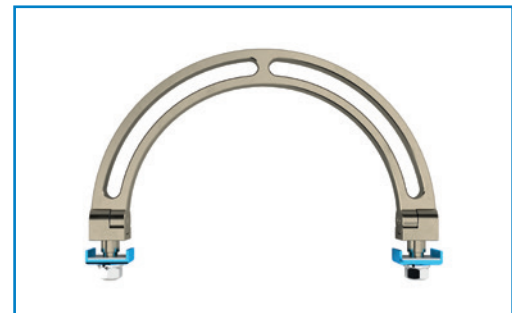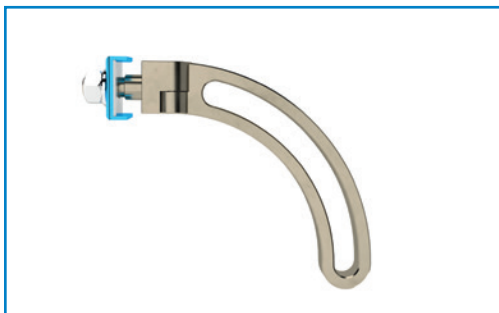


Codice Descrizione

5000076	Adattatore del supporto per raccordo ad arco per piccolo e medio
5000080	Raccordo a 90° Ø 120 mm per fissatore medio
5000081	Raccordo a 180° Ø 120 mm per fissatore medio
5000082	Raccordo a 180° Ø 160 mm per fissatore medio
5000083	Raccordo a 180° Ø 200 mm per fissatore medio

Cartucce a molla per dinamizzazione

Monouso, disponibili in confezione singola e sterile.

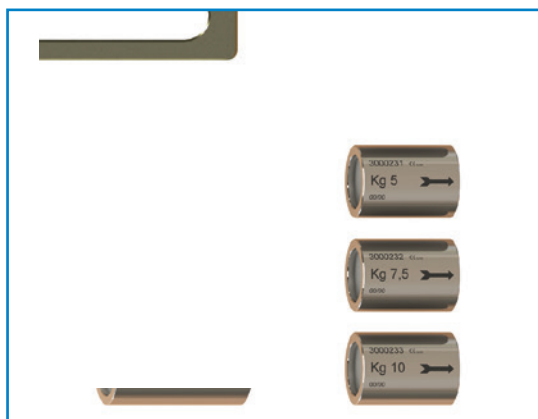


Codice	Descrizione
--------	-------------

3000251ST	Cartuccia a molla grande da 10 kg
3000252ST	Cartuccia a molla grande da 15 kg
3000253ST	Cartuccia a molla grande da 20 kg
3000231ST	Cartuccia a molla ridotta da 5 kg
3000232ST	Cartuccia a molla ridotta da 7.5 kg
3000233ST	Cartuccia a molla ridotta da 10 kg

Rondella per snodo

Consente allo snodo del corpo il solo movimento rotazionale.

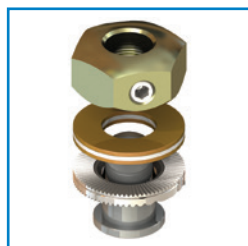

Codice	Descrizione
--------	-------------

5000036	Rondella a interfaccia liscia
---------	-------------------------------

Sterilizzazione

Il corpo del fissatore del FEP pluriuso, i raccordi ad arco e la rondella per snodo sono forniti NON sterili.

Il raccordo ad arco cod. 500080 può essere fornito anche in confezione sterile.

I dispositivi impiantabili e i morsetti sono forniti sterili.

Per lo strumentario e i dispositivi NON sterili si indica la sterilizzazione in autoclave a vapore saturo secondo i seguenti parametri:

TEMPERATURA: 134°

ESPOSIZIONE: 10 min

Codice	Descrizione	Q.tà
5000180	Cassetta sterilizzazione strumentario FEP completa	
Composta da:		
5000127	Chiave piana 26-30 mm	1
5000123	Chiave piana 19-23 mm	1
5000121	Chiave a T da 12 mm	1
5000122	Chiave piana 12 mm	1
5000600	Chiave a T per viti Ø 4.0 mm	1
5000601	Chiave a T per viti Ø 5.0 mm	1
5000602	Chiave a T per viti Ø 6.0 mm	1
5000120	Maniglione per viti Ø 4.0-5.0-6.0 mm	2
5000124	Cacciavite esagonale da 3.0 mm	1
5000140	Chiave a L da 12 mm	1
5000144	Cannula per guida viti Ø 4.0 mm	3
5000145	Cannula per guida viti Ø 5.0 mm	3
5000146	Cannula per guida viti Ø 6.0 mm	3
5000147	Cannula per guida viti Ø 7.0 mm	3
5000141	Cannula guida perforatore Ø 2.5 mm	1
5000142	Cannula guida perforatore Ø 3.5 mm	1
5000143	Cannula guida perforatore Ø 4.5 mm	1
5000148	Guida per inserimento viti	1
5000135	Regolatore micrometrico	2
5000131	Cannula guida Ø 4.0 mm	1
5000132	Cannula guida Ø 5.0 mm	1
5000133	Cannula guida Ø 6.0 mm	1
5000134	Cannula guida Ø 7.0 mm	1
5000125	Puntale con massa battente Ø 4.0 mm	1
5000126	Puntale con massa battente Ø 6.0 mm	1
5000178	Cassetta sterilizzazione strumentario FEP vuota	1

* I dispositivi impiantabili e sterili sono coperti dal marchio CE1936, lo strumentario non sterile riutilizzabile è coperto da marchio CE

**SEDE LEGALE**

Via P. Gobetti, 56r - 16145 Genova
Tel. +39 010 30801 - Fax +39 010 3080210
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it

PRODUZIONE

Via Canestrello, 2 - 36050 Monteviale (VI)
Tel. +39 0444 950100 - Fax +39 0444 950133
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it