

CLICKIT ER

SISTEMA DI FISSAZIONE DI EMERGENZA

Attacco rapido

Versatile

MR Conditional



Indicazioni

Il ClickIt ER è un fissatore d'urgenza MR Conditional per la stabilizzazione temporanea. Permette di eseguire il Damage Control Orthopedics generale e distrettuale in maniera rapida semplice e sicura, concedendo una valida stabilità.

CARATTERISTICHE

Morsetto snap & click

Unica chiave

Sterile

VANTAGGI

Per barra/vite (azzurro/grigio) che raccorda viti da 4.0 a 6.0 mm di diametro, per barra/barra (azzurro/azzurro)

Strumentario ridotto

Pronto all'uso

Componenti




Barra di fibra di carbonio
Ø 12 mm radiotrasparente.
MR Conditional.



Morsetto Multiplo
5006504ST
Posizionamento facilitato di 2 o 3
viti complanari.



Morsetto barra/vite
5006502ST
Snap&click, azzurro/grigio,
raccorda viti da 4 a 6 mm.
MR Conditional.

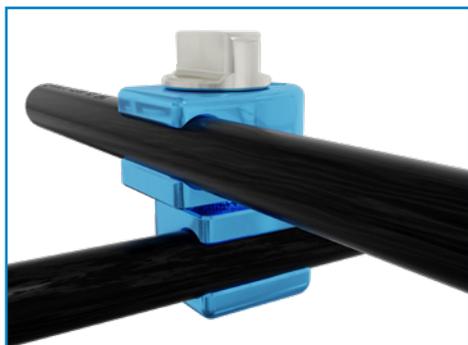

Morsetto barra/barra
5006500ST
Snap&click, azzurro/azzurro,
raccorda barre da 12 mm.
MR Conditional.



Supporto per sistema ER
5006506ST
Il supporto è utile alla realizzazione
di montaggi ibridi.
MR Conditional.

Schemi di montaggio

ARTO SUPERIORE





BACINO



ARTO INFERIORE



Vista laterale

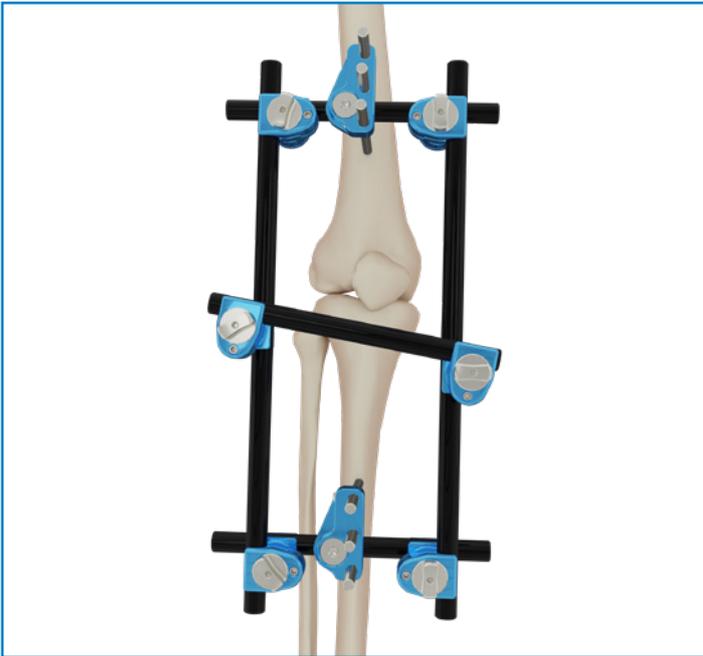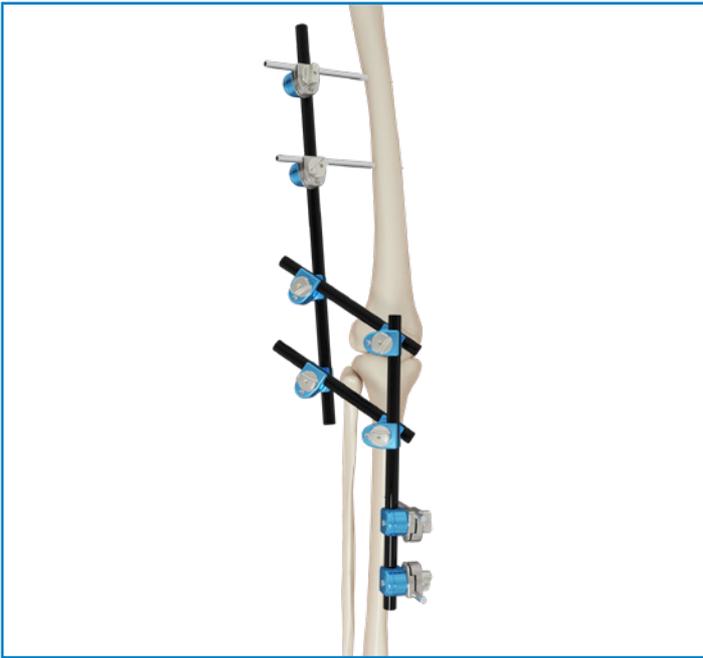



A. Montaggio realizzato con kit ER per pilone tibiale (cod. 5006600VST).

Sterilizzazione

I componenti del sistema ClickIt ER sono forniti sterili.

Per lo strumentario si indica la sterilizzazione in autoclave a vapore saturo secondo i seguenti parametri:

TEMPERATURA: 134°

ESPOSIZIONE: 10 min

CLICKIT ER

COMPONENTI e ACCESSORI

Codice	Descrizione
5006500ST	Morsetto barra/barra
5006502ST	Morsetto barra/vite
5006504ST	Morsetto multiplo ClickIt ER
5006506ST	Supporto per sistema ibrido ClickIt ER
5006510ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 100 mm
5006512ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 150mm
5006514ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 200 mm
5006516ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 250 mm
5006518ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 300 mm
5006520ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 350 mm
5006522ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 400 mm
5006526ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 500 mm
5006528ST	Barra radiotrasparente in carbonio Ø 12 L 600 mm
5006600VST	Kit pilone tibiale
5006610VST	Kit diafisi tibiale b/v
5006620VST	Kit ginocchio a ponte b/v
5006630VST	Kit diafisi femorale b/v

STRUMENTARIO *

Codice	Descrizione	Q.tà
5006562	Cassetta strumentario ClickIt ER completa	
Composta da:		
5000124	Cacciavite esagonale da 3.0 mm	1
5000600	Chiave a T per viti Ø 4.0 mm	1
5000601	Chiave a T per viti Ø 5.0 mm	1
5000602	Chiave a T per viti Ø 6.0 mm	1
5000604	Manico a T con attacco AO	1
5000606	Asta esagonale Ø 3.0 mm attacco AO	1
5006000	Chiave esagonale a L da 3.0 mm	1
5000222	Perforatore Ø 3.5 mm	1
5000224	Perforatore Ø 4.5 mm	1
5006010	Cannula perforatore Ø 3.5 mm L 110 mm	1
5000621	Chiave universale a T	1
5006.04	Adattatore Ø 4.0 per chiave a T	1
5006.05	Adattatore Ø 5.0 per chiave a T	1
5006.06	Adattatore Ø 6.0 per chiave a T	1
5006564	Barra comparazione ClickIt ER	1
5006560ER	Cassetta strumentario ClickIt ER vuota	1

* I dispositivi impiantabili e sterili sono coperti dal marchio CE1936, lo strumentario non sterile riutilizzabile è coperto da marchio CE



SEDE LEGALE

Via P. Gobetti, 56r - 16145 Genova
Tel. +39 010 30801 - Fax +39 010 3080210
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it

PRODUZIONE

Via Canestrello, 2 - 36050 Monteviale (VI)
Tel. +39 0444 950100 - Fax +39 0444 950133
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it