


CLICKIT SHOULDER

FISSATORE DA OMERO PROSSIMALE

Mini invasivo

Versatile

Stabile

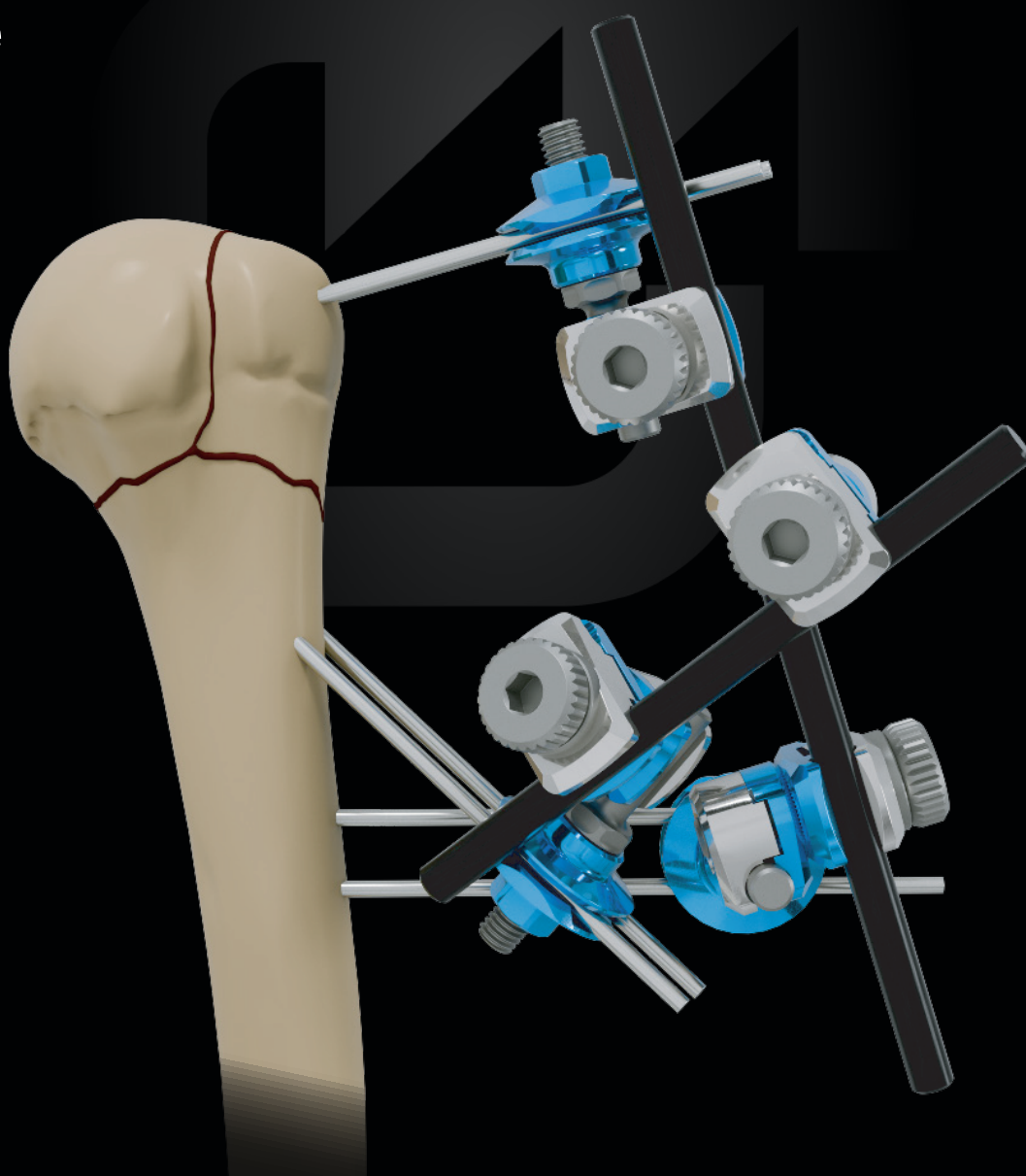

Indicazioni

Fratture omerali prossimali a due o tre frammenti.

CARATTERISTICHE

Mini invasivo

Barre in carbonio

Sterile

Stabile

Versatile

Modulare

VANTAGGI

Sintesi percutanea con fili filettati Ø 2.5 - Ø 3.0 mm
Ridotte perdite ematiche

Leggere e radiotrasparenti


Kit completo di strumentario dedicato pronto all'uso

Mobilizzazione precoce

Posizionamento dei fili senza vincoli spaziali


Unico morsetto per barre e viti

Componenti

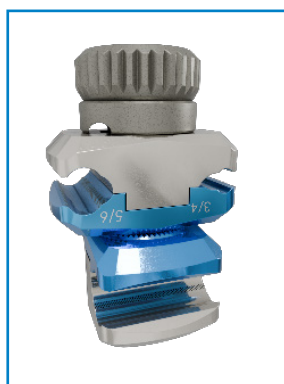

Morsetto universale piccolo

Realizzato in lega di Alluminio e Acciaio.
Consente l'accoppiamento tra barre e/o viti di diametro compreso tra 3.0 mm e 6.0 mm.
Permette l'accoppiamento di un filo singolo di diametro compreso tra 2.5 mm e 3.0 mm.

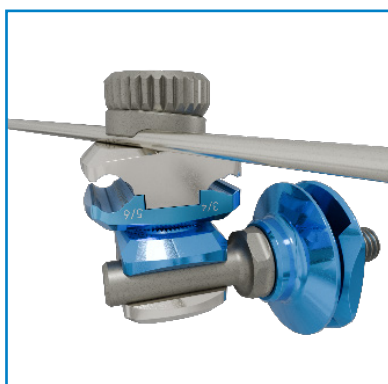

Morsetto per fili

Realizzato in lega di Alluminio e Acciaio.
Consente il raccordo tra una coppia di fili di diametro 2.5 mm e 3.0 mm e un morsetto per barra.
L'accoppiamento dei fili al morsetto è ad attacco rapido.



Barre in carbonio

Diametro 6.0 mm e lunghezza variabile compresa tra 100 mm e 400 mm.


Note di tecnica operatoria




Utilizzando la guida per il filo, inserire ogni filo con trapano a motore (a ridotto numero di giri). Posizionare il primo filo con una direzione di circa 20° rispetto alla diafisi omerale e direzionarlo in modo da avere una presa nel calcar. Introdurre il filo fino alla testa omerale senza oltrepassarla. Controllare l'avanzamento del filo tramite scopia.




Inserire il secondo filo circa 1 cm prossimale rispetto al primo.

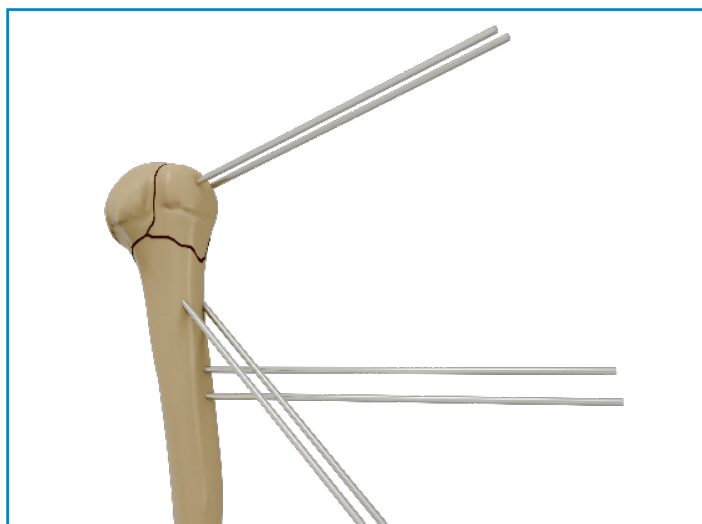


Inserire un'altra coppia di fili prossimali rispetto ai primi. Si consiglia di inserire un'altra coppia di fili nella porzione prossimale della testa, al fine di ottenere una stabilità migliore. Se necessario, piegare i fili a circa 90° .

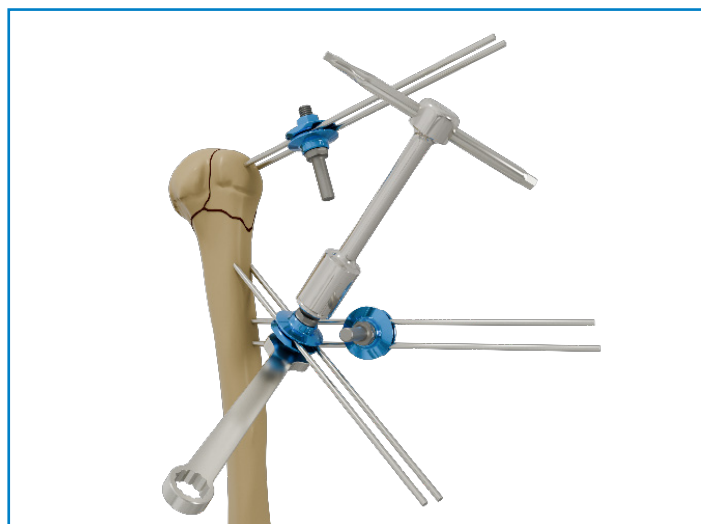

Posizionare il morsetto per fili su ciascuna coppia di fili ad una distanza di circa 3 cm dalla cute. Serrare il morsetto utilizzando la chiave piana da 10 mm e la chiave a T. Tagliare i fili.

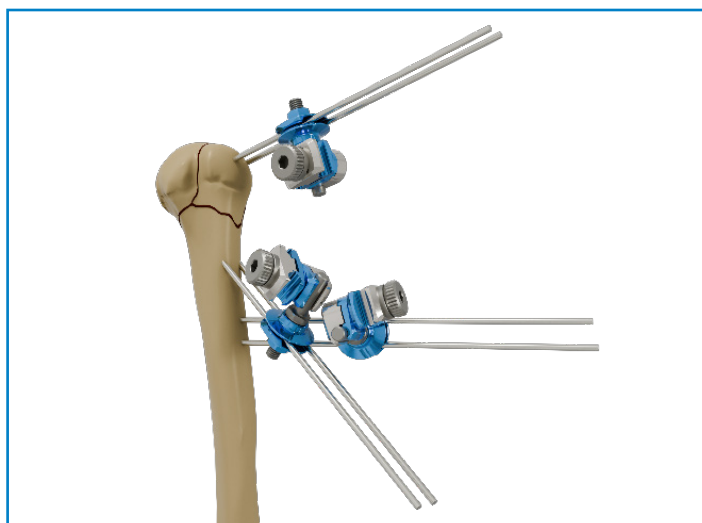


Applicare i morsetti universali piccoli ad ogni morsetto per filo.

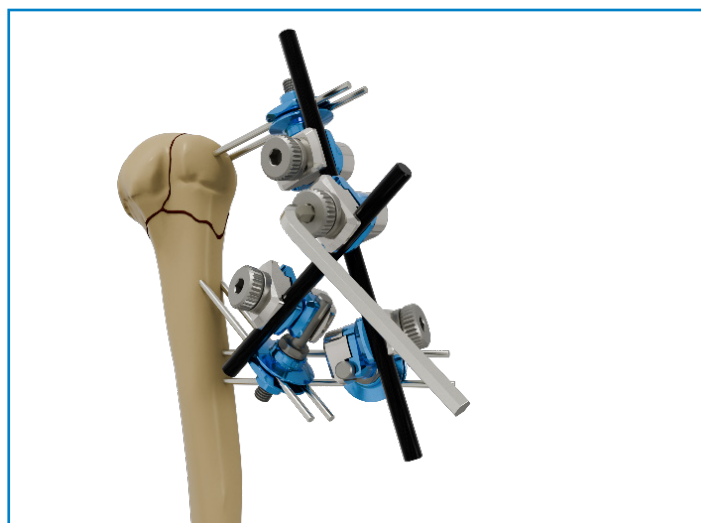

Collegare i morsetti tramite le barre.
Serrare i morsetti universali piccoli utilizzando la chiave a L da 5 mm.

Kit ClickIt Shoulder

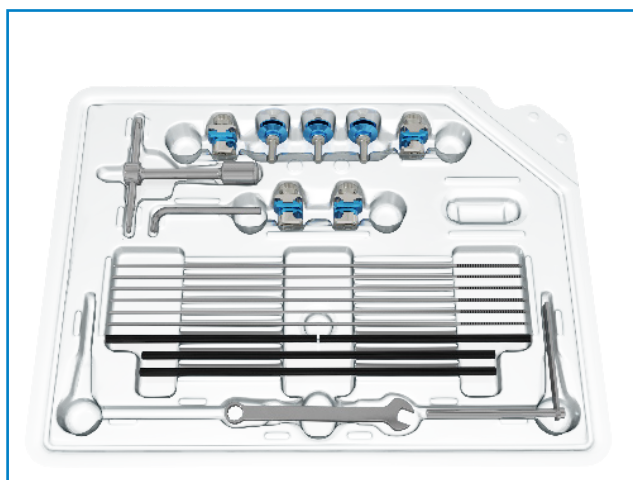

Descrizione

Q.tà

Morsetto universale piccolo	4
Morsetto per filo	3
Barra Ø 6.0 mm L 150 mm	2
Barra Ø 6.0 mm L 250 mm o L 100 mm	2
Filo filettato Ø 2.5 mm L 300 mm filetto 70 mm	6
Cannula per fili Ø 3.0 mm	1
Chiave a T universale	1
Chiave a L da 5 mm	1
Chiave piana da 10 mm	1

Ogni componente è disponibile in confezione singola sterile.
Nel caso di utilizzo dei singoli componenti, viene fornito uno strumentario pluriuso.

Sterilizzazione


Il kit ClickIt Shoulder è fornito sterile.
Per lo strumentario si indica la sterilizzazione in autoclave a vapore saturo secondo i seguenti parametri:

TEMPERATURA: 134°

ESPOSIZIONE: 5 min

Casi clinici

CASO 1 Dott. N. Godi, Dott. P. Avanzi, Dott. C. Zorzi - Ospedale Sacro Cuore di Negrar (VR)

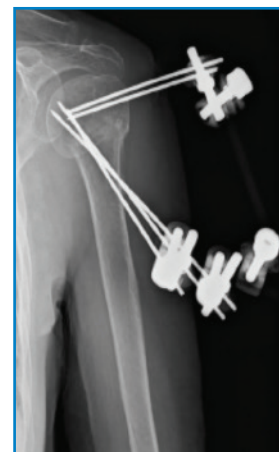

♀ 76 aa.
Incidente domestico
Rx preoperatoria

Controllo e clinica postoperatoria


Controllo a 40 giorni

CASO 2 Dott. N. Godi, Dott. P. Avanzi, Dott. C. Zorzi - Ospedale Sacro Cuore di Negrar (VR)




♀ 56 aa
Incidente domestico
Rx preoperatoria


Controllo e clinica postoperatoria

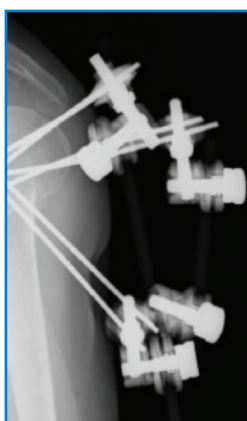


Controllo a 60 giorni e rimozione

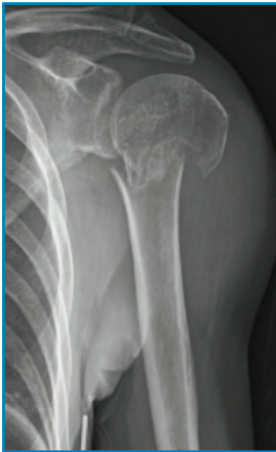

♀ 72 aa
Incidente domestico
Rx preoperatoria

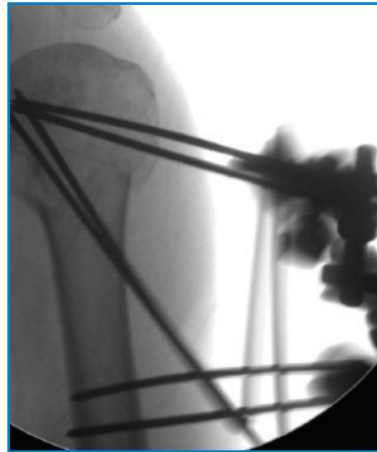

Controllo postoperatorio e clinica

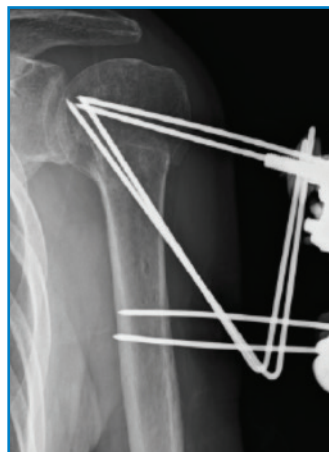

Controllo, guarigione e clinica a 45 giorni

5000630ST KIT CLICKIT SHOULDER con barra Ø 6.0 mm L 150 mm e L 250 mm

5000630STA KIT CLICKIT SHOULDER con barra Ø 6.0 mm L 100 mm e L 150 mm

5000630STC KIT CLICKIT SHOULDER senza fili

COMPONENTI e ACCESSORI

Codice	Descrizione
5000614ST	MORSETTO UNIVERSALE PICCOLO ER Ø6MM ST
5000616ST	CLIP PER FILI Ø2.5MM ST
5006.10ST	BARRA Ø6MM L100MM ST
5006.15ST	BARRA Ø6MM L150MM ST
5006.20ST	BARRA Ø6MM L200MM ST
5006.25ST	BARRA Ø6MM L250MM ST
5006.30ST	BARRA Ø6MM L300MM ST
5006.35ST	BARRA Ø6MM L350MM ST
5006.40ST	BARRA Ø6MM L400MM ST
5000610ST	FILO FILETTATO Ø2.5MM L300MM ST
5000611ST	FILO FILETTATO Ø3MM L300MM ST
5000610TST	FILO FILETTATO Ø2.5MM L300MM TI ST
5000611TST	FILO FILETTATO Ø3MM L300MM TI ST

STRUMENTARIO

Codice	Descrizione	
5006562SHO	CASSETTA STERILIZZAZIONE STRUMENTARIO CLICKIT SHOULDER COMPLETA	
Composta da:		Q.tà
5000621	CHIAVE A T UNIVERSALE	1
5000622	CHIAVE ESAGONALE A L DA 5.0 MM	1
5000623	CHIAVE PIANA DA 10 MM	1
5000624	CANNULA PER FILO Ø 3.0 MM	1
5006560SHO	CASSETTA STERILIZZAZIONE STRUMENTARIO CLICKIT SHOULDER VUOTA	1



SEDE LEGALE

Via P. Gobetti, 56r - 16145 Genova
Tel. +39 010 30801 - Fax +39 010 3080210
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it

PRODUZIONE

Via Canestrello, 2 - 36050 Monteviale (VI)
Tel. +39 0444 950100 - Fax +39 0444 950133
www.mikai.it - servizio.clienti@mikai.it